



# Contour<sup>®</sup> plus ONE<sup>»</sup>

Blood Glucose  
Monitoring System

# 使用 CONTOUR™ DIABETES 应用查看血糖模式



更改治疗、饮食或锻炼之前，请务必咨询您的医疗保健提供商。



Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>™</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

**我的模式**功能可识别血糖读数中的特定模式和趋势，并告诉您背后的可能原因。



**Contour<sup>®</sup>**  
**plus ONE<sup>®</sup>**  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 1. 模式

### CONTOUR DIABETES

应用检测到一个模式后，  
您会收到**检测到新模式**消息。



Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>™</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 1. 模式

### CONTOUR DIABETES

应用检测到一个模式后，  
您会收到**检测到新模式**消息。

按**查看更多**了解关于模式的  
更多信息。



Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>™</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 2. 模式

**最近高点**模式显示过去高于目标范围的 3 次血糖读数。



Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 2. 模式

**最近高点**模式显示过去高于目标范围的 3 次血糖读数。

按**了解更多**阅读可能原因。



Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>™</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

### 3. 模式

如果您知道您的血糖读数高的原因，您可以在此处选择。



Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

### 3. 模式

如果您知道您的血糖读数高的原因，您可以在此处选择。




Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 4.

### 我的模式

CONTOUR DIABETES 应用提供  
与此模式的可能原因相关的一些信息。

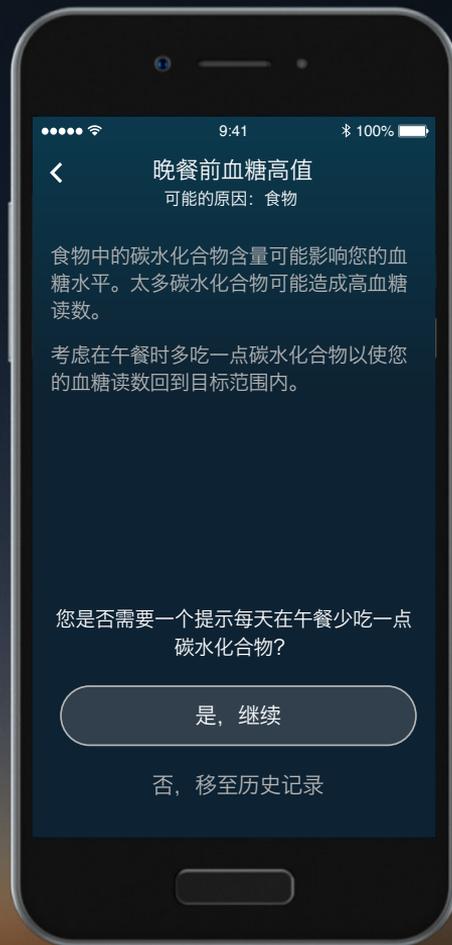


Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>™</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

#### 4.

### 我的模式

CONTOUR DIABETES 应用提供与此模式的可能原因相关的一些信息。

按**是，继续**以设置每天少吃碳水化合物的提醒。

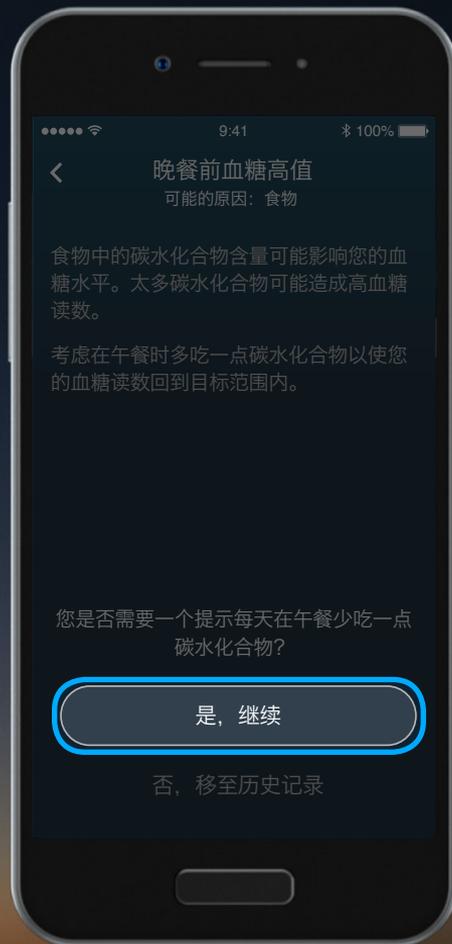

Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>™</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 5. 我的模式

滚动以选择每天接收少吃碳水化合物提醒的时间。



Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 5. 我的模式

滚动以选择每天接收少吃碳水化合物提醒的时间。

按**确认**设置时间。



Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 6. 模式

在您的所选时间会显示一条提醒。



Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 6. 模式

在您的所选时间会显示一条提醒。



Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 7. 我的模式

3 天后会显示一条跟进消息，通知您是否您的改变有助于改善**最近高点**模式。



Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 7. 我的模式

3 天后会显示一条跟进消息，通知您是否您的改变有助于改善**最近高点**模式。


按**查看更多**以了解更多。



Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 7. 模式

此模式已移到您的历史中，您可随时在主菜单中选择**我的模式**来查看。

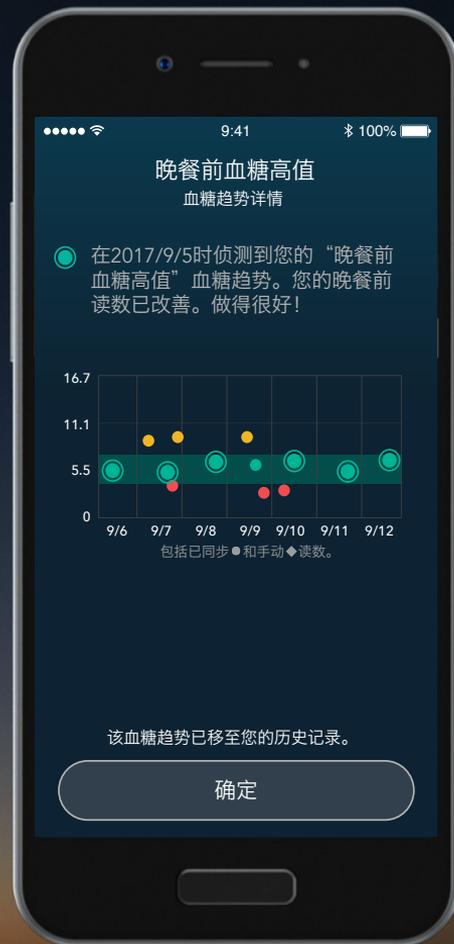

Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 8. 模式

您可随时在**模式历史**中访问您的模式，添加关于此模式可能原因的其他说明，以在您将来预约您的医疗保健专业人员时为您提供帮助。



Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>™</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

## 8. 模式

您可随时在**模式历史**中访问您的模式，添加关于此模式可能原因的其他说明，以在您将来预约您的医疗保健专业人员时为您提供帮助。



Contour<sup>®</sup>  
plus ONE<sup>»</sup>  
Blood Glucose  
Monitoring System

如果您对 **CONTOUR®PLUS ONE** 智能测量仪或 **CONTOUR™ DIABETES** 应用有任何疑问，请咨询您的医疗保健专业人员或查阅产品用户指南。

若需更多信息，或了解在您的所在国家/地区是否销售这些产品，请访问 [diabetes.ascensia.com](http://diabetes.ascensia.com)。



假设的患者数据，仅用于演示目的。  
更改治疗、饮食或锻炼之前，请务必咨询您的医疗保健提供商。



Apple 和 Apple 标志是 Apple Inc. 在美国和其他国家的注册商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标记。Bluetooth 单词标记和标志是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，此处的所有标记使用均已得到许可。Google play 和 Google Play 标志是 Google Inc. 的商标。

Ascensia、Ascensia Diabetes Care 标志和 Contour 是 Ascensia Diabetes Care Holdings AG 的商标和/或注册商标。

编写日期：2018 年 2 月 代码：G.DC.12.2017.52579



**Contour®  
plus ONE**  
Blood Glucose  
Monitoring System

[diabetes.ascensia.com](http://diabetes.ascensia.com)



# Contour<sup>®</sup>

diabetes solutions