




Contour[®] plus ONE[»]

Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

Menggunakan ciri
smartLIGHT™
pada meter pintar
CONTOUR® PLUS ONE

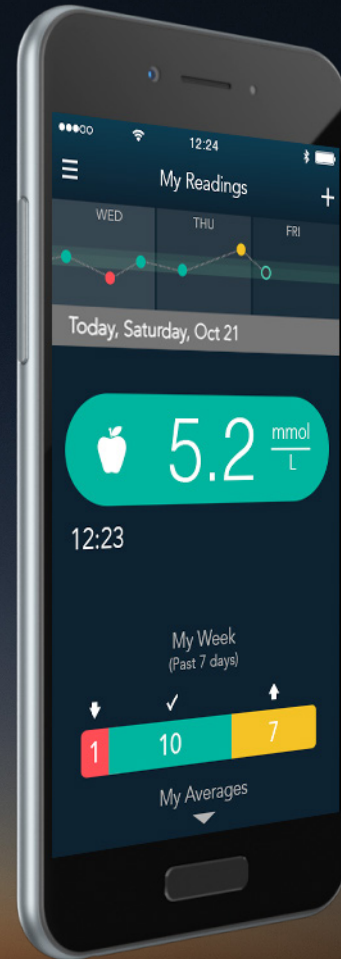


Sentiasa berunding dengan penyedia perkhidmatan kesihatan anda terlebih dahulu sebelum membuat perubahan kepada rawatan, diet atau senaman.

Hak Cipta 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Hak cipta terpelihara.

Contour®
plus ONE®
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah


diabetes.ascensia.com

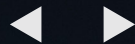

Ciri **smartLIGHT** memberi anda maklum balas serta-merta mengenai bacaan glukosa darah anda.



Contour[®]
plus **ONE**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

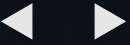

1.

Ciri smartLIGHT

Selepas anda memantau glukosa darah dan jika penetapan Cahaya Sasaran dihidupkan, lampu pangkalan jalur ujian memaparkan warna yang mewakili nilai bacaan berbanding dengan Sebelum Makan, Selepas Makan atau Julat Sasaran Keseluruhan.



Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

2.

Ciri smartLIGHT

Jika bacaan glukosa darah anda berada dalam julat sasaran, ciri smartLIGHT berwarna hijau dan meter akan berbunyi bip. Dalam Sasaran



Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

3.

Ciri smartLIGHT

Jika bacaan glukosa darah anda di bawah sasaran, ciri smartLIGHT berwarna merah dan meter akan berbunyi bip.

Di Bawah Sasaran



Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

4.

Ciri smartLIGHT

Jika bacaan glukosa darah anda melebihi sasaran, ciri smartLIGHT berwarna kuning dan meter akan berbunyi bip.

Melebihi Sasaran



Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

5.

Ciri smartLIGHT

Jika anda tidak memilih Meal Marker (Penanda Makan), ciri smartLIGHT akan menunjukkan bacaan ujian glukosa darah anda berbanding dengan Julat Sasaran Keseluruhan anda.



Contour[®]
plus ONE[»]
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

Dapatkan nasihat dari pihak Profesional Penjagaan Kesihatan dan rujuk kepada panduan pengguna produk jika anda mempunyai apa-apa soalan tentang meter pintar **CONTOUR®PLUS ONE** dan **aplikasi CONTOUR™ DIABETES**.

Untuk maklumat lanjut, dan untuk mengetahui sama ada produk ini boleh didapati di negara anda, kunjungi **diabetes.ascensia.com**



Sentiasa berunding dengan penyedia penjagaan kesihatan anda terlebih dahulu sebelum membuat perubahan kepada rawatan, diet atau senaman.

Dapatkan aplikasi




Apple dan logo Apple ialah tanda dagangan Apple Inc., yang berdaftar di Amerika Syarikat dan negara-negara lain. App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc. Tanda perkataan dan logo Bluetooth ialah tanda dagangan berdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc., dan sebarang penggunaan tanda sedemikian di dalam ini adalah di bawah lesen. Google Play dan logo Google Play ialah tanda dagangan Google Inc.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care dan Contour ialah tanda dagangan dan/atau tanda dagangan berdaftar Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Tarikh penyediaan: Februari 2008 kod: G.DC. 12.2017.52593

Hak Cipta 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Hak cipta terpelihara.

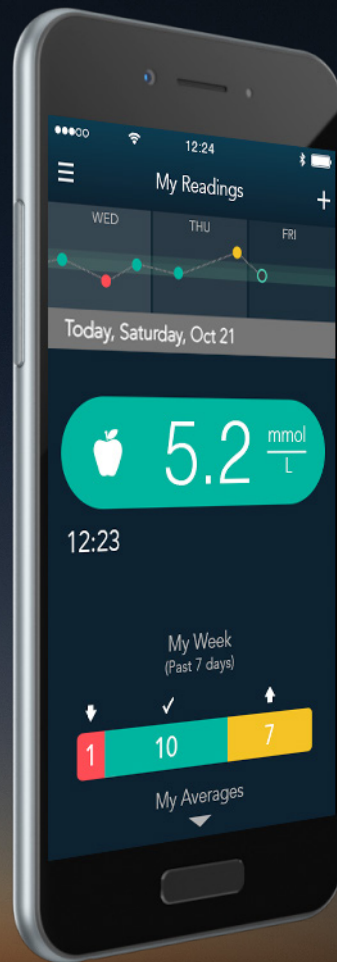

Contour
plus ONE
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

diabetes.ascensia.com



Contour[®]

Diabetes Solutions