



Contour[®] plus ONE[»]

Blood Glucose
Monitoring System

使用 **CONTOUR™** **DIABETES** 应用创建测试提醒计划



更改治疗、饮食或锻炼之前，请务必咨询您的医疗保健提供商。



Contour[®]
plus ONE[™]
Blood Glucose
Monitoring System

diabetes.ascensia.com

测试提醒计划可帮助您优化监测读数，让您更加了解您的血糖。



Contour[®]
plus ONE[™]
Blood Glucose
Monitoring System

1. 测试提醒计划

您可以从主菜单中选择我的提醒，
然后按+来选择测试提醒计划。



Contour[®]
plus ONE[®]
Blood Glucose
Monitoring System

1. 测试提醒计划

您可以从**主菜单**中选择**我的提醒**，
然后按**+**来选择**测试提醒计划**。



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

1.

测试提醒计划

选择**测试提醒计划**以创建测试提醒计划。




Contour[®]
plus ONE[™]
Blood Glucose
Monitoring System

2.

测试提醒计划

选择您要操作的**测试提醒计划**

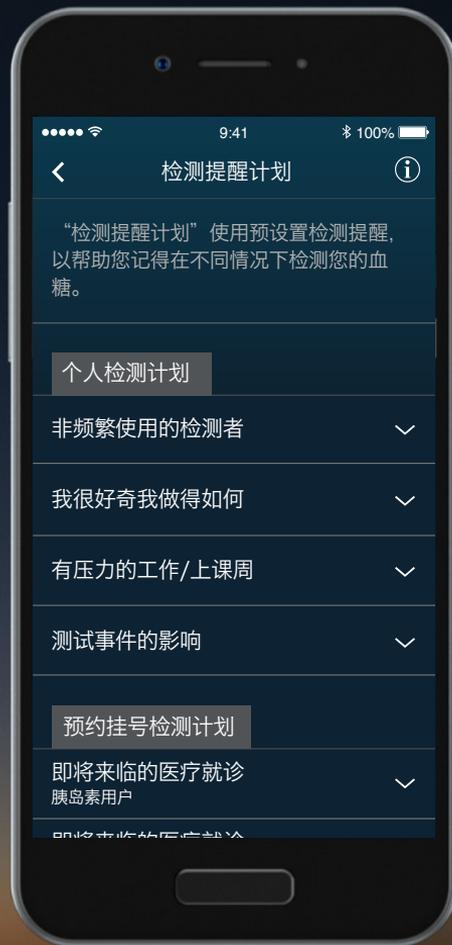

Contour[®]
plus ONE[®]
Blood Glucose
Monitoring System

2. 测试提醒计划

选择您要操作的**测试提醒计划**。

按各计划旁的箭头可查看更多相关信息。



Contour[®]
plus ONE[™]
Blood Glucose
Monitoring System

2. 测试提醒计划

选择您要操作的**测试提醒计划**。

按各计划旁的箭头可查看更多相关信息。

选择**继续**自定义您选择的**测试提醒计划**。



Contour[®]
plus ONE[™]
Blood Glucose
Monitoring System

3. 测试提醒计划


按日期和时间按钮设置要跟踪的事件的日期和时间。



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

3. 测试提醒计划


按日期和时间按钮设置要跟踪的事件的日期和时间。

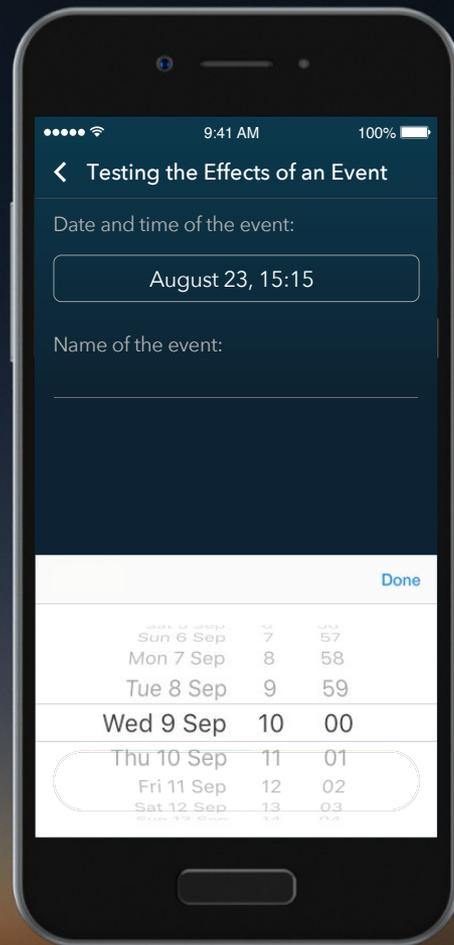

Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

3. 测试提醒计划

按“活动名称”区域打开键盘并命名您的事件。

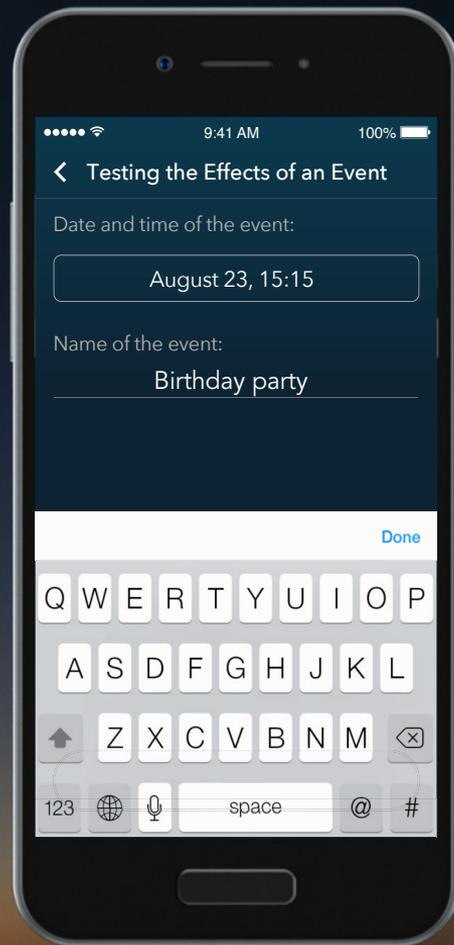

Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

3. 测试提醒计划 按 保存。



Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System


diabetes.ascensia.com

3.

测试提醒计划

按 **保存**。

您的**测试提醒计划**即激活。

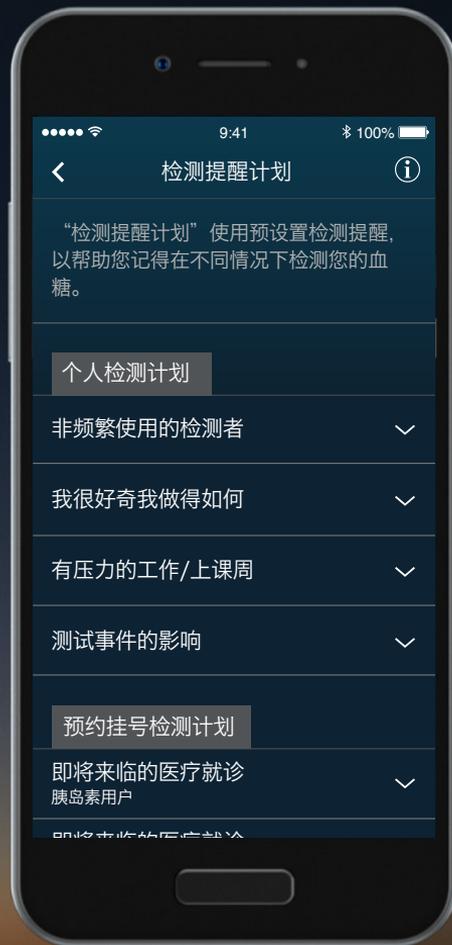

Contour[®]
plus ONE[»]
Blood Glucose
Monitoring System

如果您对 **CONTOUR®PLUS ONE** 智能测量仪或 **CONTOUR™ DIABETES** 应用有任何疑问，请咨询您的医疗保健专业人员或查阅产品用户指南。

若需更多信息，或了解在您的所在国家/地区是否销售这些产品，请访问 diabetes.ascensia.com。



假设的患者数据，仅用于演示目的。
更改治疗、饮食或锻炼之前，请务必咨询您的医疗保健提供商。



Apple 和 Apple 标志是 Apple Inc. 在美国和其他国家的注册商标。App Store 是 Apple Inc. 的服务标记。Bluetooth 单词标记和标志是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，此处的所有标记使用均已得到许可。Google play 和 Google Play 标志是 Google Inc. 的商标。

Ascensia、Ascensia Diabetes Care 标志和 Contour 是 Ascensia Diabetes Care Holdings AG 的商标和/或注册商标。

编写日期：2018 年 2 月 代码：G.DC.12.2017.52580



**Contour®
plus ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

diabetes.ascensia.com



Contour[®]

diabetes solutions