



Contour® Plus ONE™

Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

Menetapkan Pelan Peringatan Ujian dengan **aplikasi CONTOUR™ DIABETES**




Sentiasa berunding dengan penyedia penjagaan kesihatan anda sebelum membuat perubahan kepada rawatan, diet atau senaman.



**Contour
plus ONE®**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

Test Reminder Plans membantu anda mengoptimalkan pemantauan anda untuk menghasilkan bacaan dengan gambaran keseluruhan yang lebih bermakna tentang glukosa darah anda.

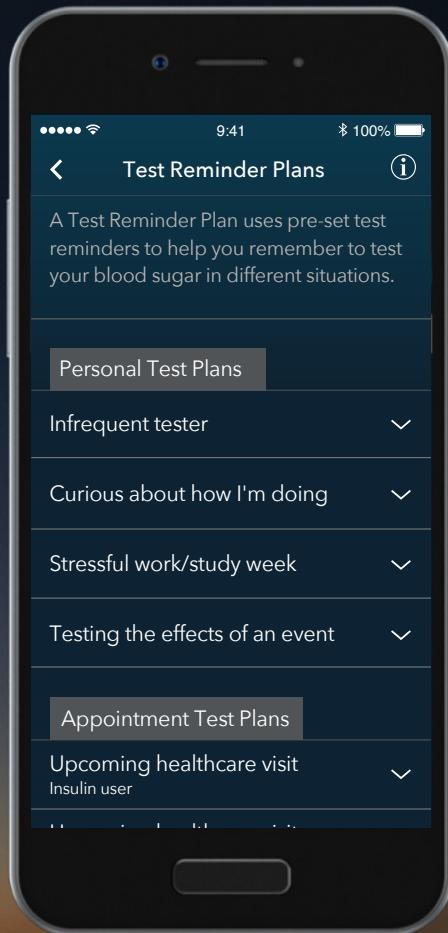


**Contour
plus ONE®**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

1.

Test Reminder Plan

Anda boleh menetapkan Pelan **Test Reminder Plan** dengan memilih **My Reminders** dari **Main Menu** (Menu Utama) dan kemudian tekan **+**.

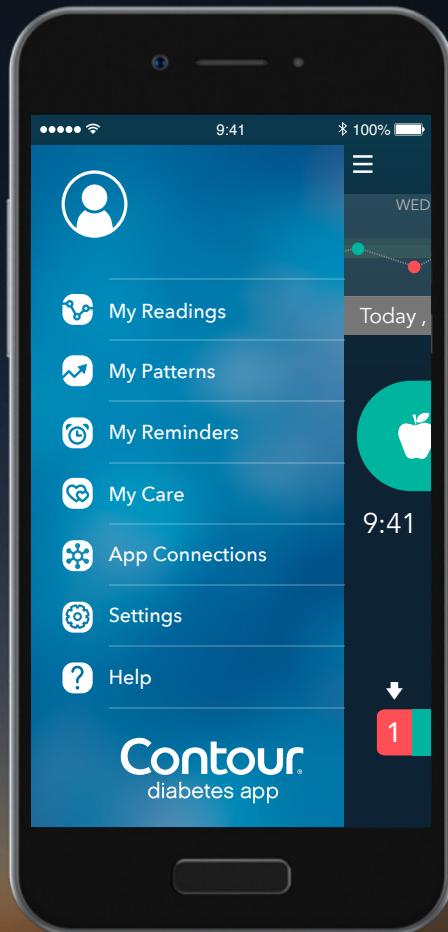


Contour
plus **ONE**[®]
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

1.

Test Reminder Plan

Anda boleh menetapkan Pelan **Test Reminder Plan** dengan memilih **My Reminders** dari **Main Menu** (Menu Utama) dan kemudian tekan **+**.

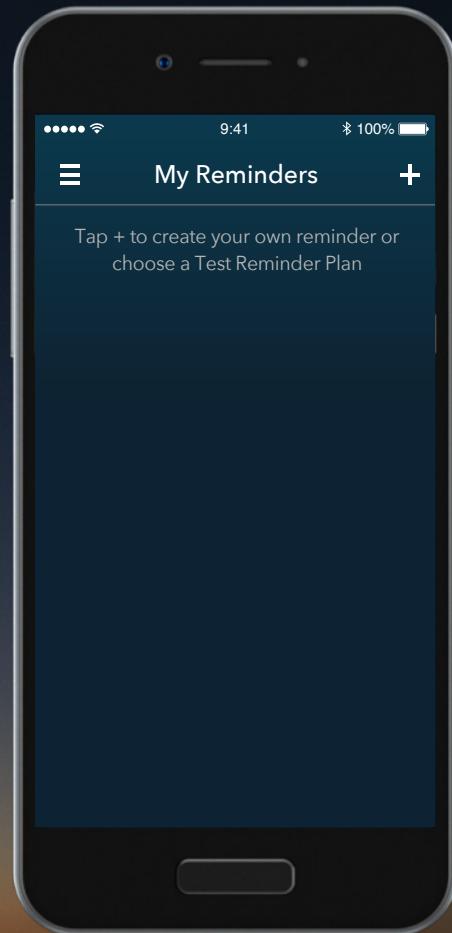


**Contour®
plus ONE™**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

1.

Test Reminder Plan


Pilih ‘**Test Reminder Plan**’ untuk menetapkan Pelan Peringatan Ujian.

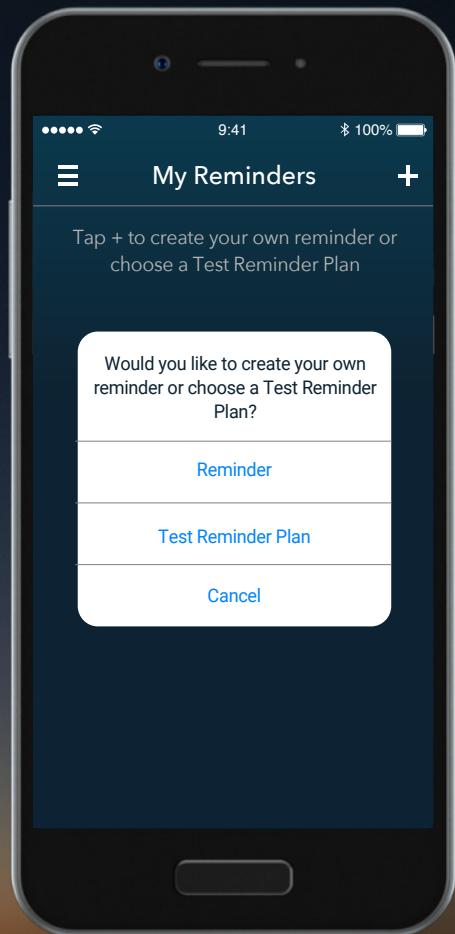

Contour®
plus ONE™
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

2. Test Reminder Plan

Pilih **Test Reminder Plan** yang anda mahu guna pakai.

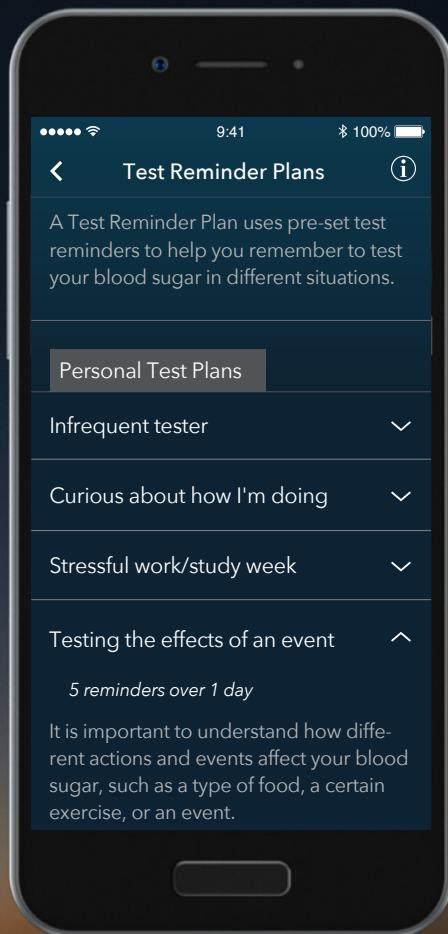


**Contour®
plus ONE™**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

2.

Test Reminder Plan

Pilih **Test Reminder Plan** yang anda mahu guna pakai.

Tekan anak panah bersebelahan setiap pelan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenainya.

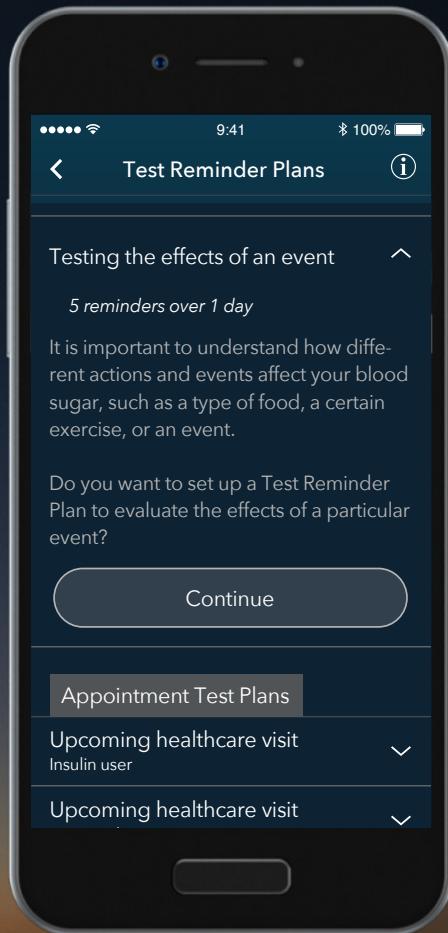

**Contour
plus ONE®**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah


2.

Test Reminder Plan

Pilih **Test Reminder Plan** yang anda mahu guna pakai.

Tekan anak panah bersebelahan setiap pelan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenainya.


Pilih Continue untuk menyesuaikan Pelan Peringatan Ujian pilihan anda.

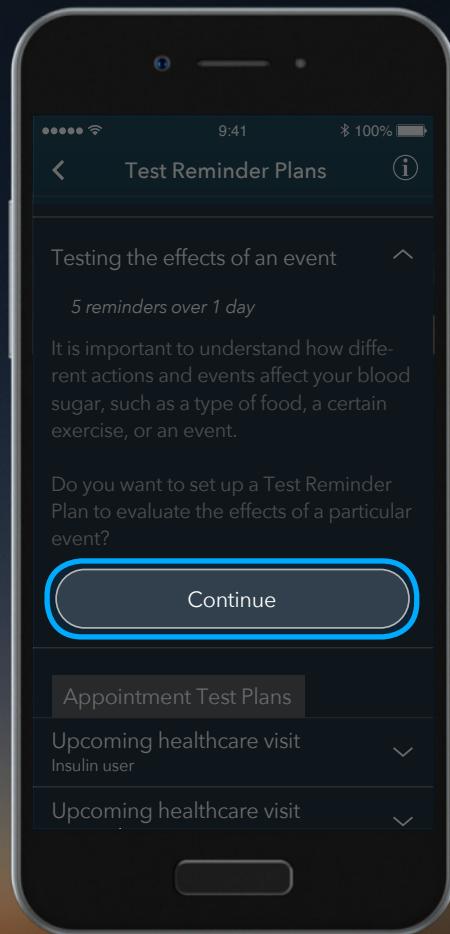

Contour
plus ONE
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

3. Test Reminder Plan


Tekan butang tarikh dan masa untuk menetapkan tarikh dan masa acara yang ingin anda jejak.

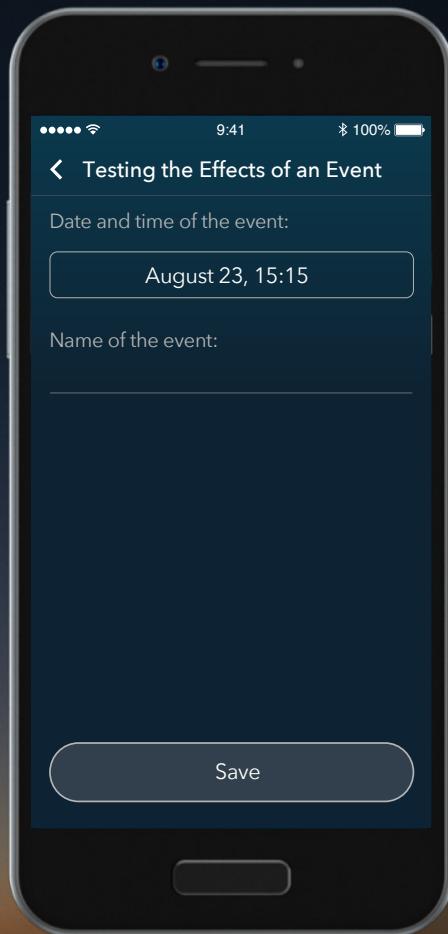

**Contour®
plus ONE™**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

3. Test Reminder Plan


Tekan butang tarikh dan masa untuk menetapkan tarikh dan masa acara yang ingin anda jejak.

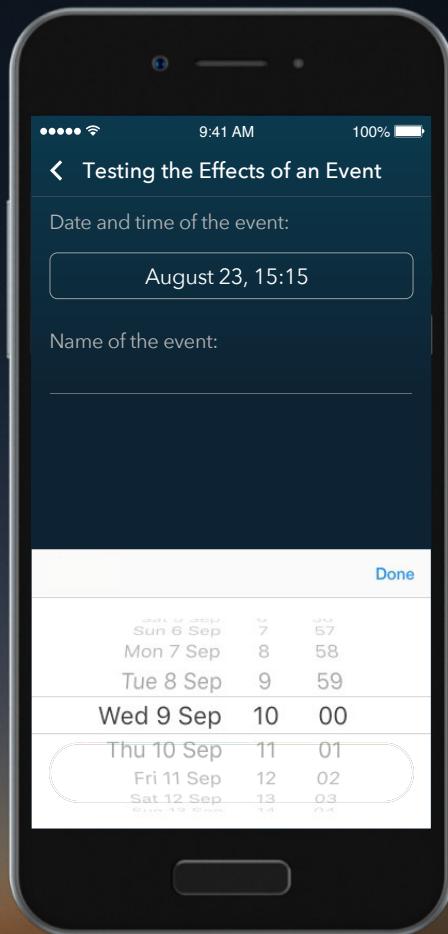

**Contour®
plus ONE™**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah


3. Test Reminder Plan

Tekan bahagian Event Name (Nama Acara) untuk memaparkan pad kekunci dan menamakan acara anda.

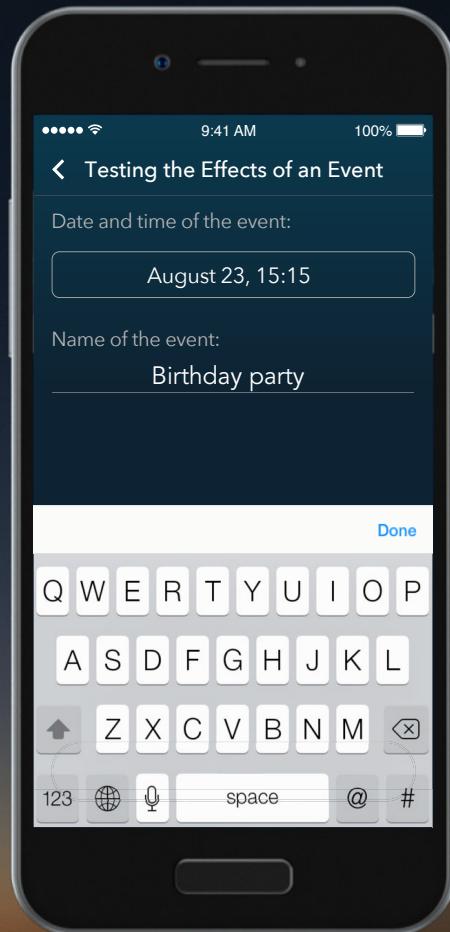

**Contour®
plus ONE™**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

3. | **Test Reminder Plan**
Tekan **Save.**

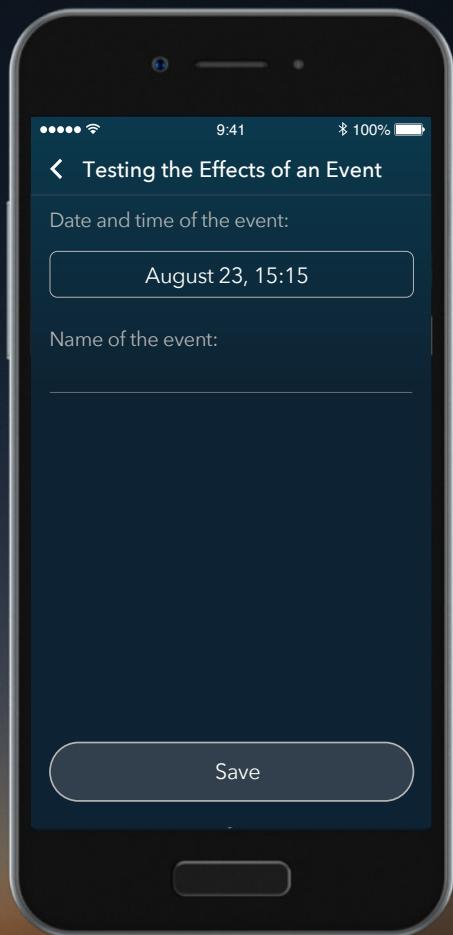


**Contour®
plus ONE™**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

3. Test Reminder Plan

Tekan **Save**.

Pelan Peringatan Ujian Anda kini telah diaktifkan.

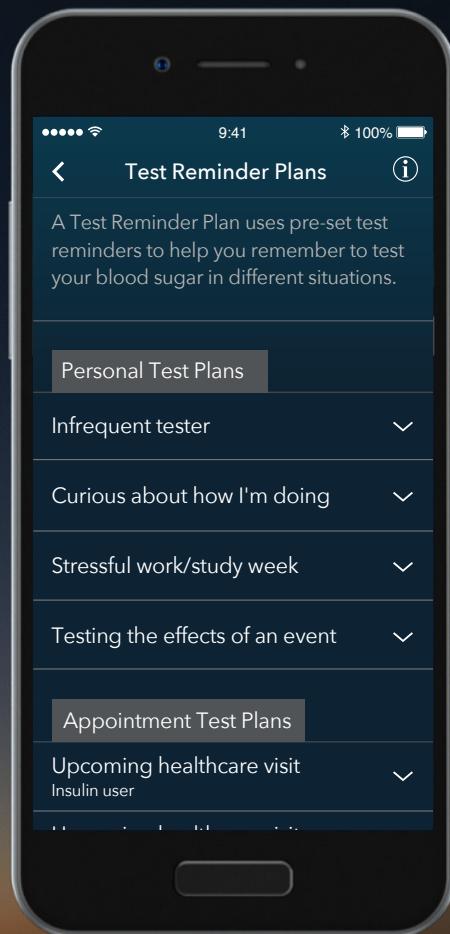

**Contour
plus ONE®**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

Dapatkan nasihat dari pihak Profesional Penjagaan Kesihatan dan rujuk kepada panduan pengguna produk jika anda mempunyai apa-apa soalan tentang meter pintar **CONTOUR®PLUS ONE** dan aplikasi **CONTOUR™ DIABETES**.

Untuk maklumat lanjut, dan untuk mengetahui sama ada produk ini boleh didapati di negara anda, kunjungi diabetes.ascensia.com



Data pesakit yang dipaparkan adalah sebagai gambaran sahaja.

Sentiasa berunding dengan penyedia perkhidmatan kesihatan anda sebelum membuat perubahan kepada rawatan, diet atau senaman.



Apple dan logo Apple ialah tanda dagangan Apple Inc., yang berdaftar di Amerika Syarikat dan negara-negara lain. App Store ialah tanda perkhidmatan Apple Inc. Tanda perkataan dan logo Bluetooth ialah tanda dagangan berdaftar yang dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc., dan sebarang penggunaan tanda sedemikian di dalam ini adalah di bawah lesen. Google Play dan logo Google Play ialah tanda dagangan Google Inc.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care dan Contour ialah tanda dagangan dan/atau tanda dagangan berdaftar Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Tarikh penyediaan: Februari 2018 kod: G.DC.12.2017.52580

Hak Cipta 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Hak cipta terpelihara.



**Contour®
plus ONE™**
Sistem Pemantauan
Glukosa Darah

diabetes.ascensia.com



Contour[®]

Diabetes Solutions